

**fitFORM**  
member of Wellco<sup>®</sup>

# Fitform Pflege-Kollektion

*Ihr Wohlbefinden ist unser Anliegen*

Abb. Modell 570 Vario

## Gesundes Sitzen für jeden

Speziell für Menschen die einen großen Teil des Tages im Sitzen verbringen und für die gutes Sitzen nicht selbstverständlich ist, hat Fitform die Sessel der Pflege-Kollektion entwickelt. Diese Sessel bieten zahlreiche, individuelle Sitzlösungen und können vollständig an Ihre persönlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mehr als 75.000 zufriedene Nutzer sprechen dabei für sich.

### Komfortabel sitzen, ausruhen und bequem aufstehen

Langes, starres Sitzen ist nicht gesund. Darum verfügen die Fitform-Sessel der Pflege-Kollektion über Elektromotoren und können mittels einer Handbedienung in verschiedene Positionen verfahren werden.



Rückenbelastung wird damit stark vermindert. Ein außergewöhnlich gutes Sitzgefühl stellt sich ein.

### Verstellung der Rückenlehne

Mit den blauen Tasten können Sie den Winkel zwischen Rückenlehne und Sitzfläche einstellen. Wenn Sie bereits die Kanelverstellung angewendet haben, können Sie die Rückenlehne so noch weiter nach hinten bewegen um in eine Liegeposition zu gelangen. Ihre Beine liegen jetzt höher als das Herz. Man spricht von der sog. Herz-Waage-Position.

Die vornehmlich eingesetzte Variante verfügt über 3 Motoren und bietet folgende Funktionen:

### Beinstütze

Mit Hilfe der gelben Tasten fährt die Beinstütze heraus, hebt Ihre Beine an und lässt sie dadurch ohne Druck entspannen.

### Aufstehfunktion

Die Aufstehfunktion hilft Ihnen auf Tastendruck deutlich bequemer aus dem Sessel aufzustehen. Dadurch das der gesamte Sessel angehoben und leicht nach vorne gekippt wird, bleiben dabei Ihre Füße auf dem Boden. So haben Sie einen festen Stand und können einfach aus dem Sessel aufstehen. Auch das Hineinsetzen wird deutlich leichter, wenn sich der Sessel in der Aufstehposition befindet.

### Kanelverstellung

Durch Drücken der roten Taste wird die Kanelverstellung aktiviert. Hierbei fährt die Rückenlehne zusammen mit der Sitzfläche als eine Einheit nach hinten, ohne das sich der Sitzwinkel ändert. Sie rutschen nicht aus dem Sessel und die

## Maßarbeit

Die Sessel der Fitform Pflege-Kollektion wurden entwickelt um Ihr Leben angenehmer zu machen. Da jeder Mensch unterschiedlich ist, sind diese Sessel auf Maß einstellbar. Die Sitzhöhe, die Sitztiefe und die Armlehnenhöhe können individuell für Sie eingestellt werden. Die eingebaute Lendenstütze können Sie eigenständig in der gewünschten Höhe und Dicke einstellen.



Das gilt auch für die integrierte knickbare Kopfstütze. Die Oberseite der Rückenlehne können Sie dabei nach vorne biegen. Wir nennen das die "Topswing-Kopfstütze".

- 1 Sitzhöhe einstellbar von 40 bis 60 cm
- 2 Sitztiefe einstellbar von 43 bis 53 cm
- 3 Armlehnenhöhe von 16 bis 29 cm
- 4 Lendenstütze in Höhe und Dicke einstellbar
- 5 Sitzwinkel verstellbar

## 3 Modelle: 1 Ziel

Im Mittelpunkt unserer Entwicklungsarbeit steht der Mensch. Unser Ziel ist der bestmögliche Sitzkomfort und die optimale Sitzlösung für jeden unserer Nutzer. Damit zudem auch die optischen Vorgaben unserer Kunden nicht unberücksichtigt bleiben, können Sie aus drei unterschiedlichen Modellen wählen:



### Modell 560 Vario



### Modell 570 Vario



### Modell 574 Vario



# Eine passende Lösung für jedes Sitzproblem

Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung mit den verschiedensten Sitzproblemen, ist das Sortiment der Optionen und speziellen Anpassungen für die Sessel der Pflege-Kollektion mittlerweile so umfangreich, dass wir auf fast jede Anforderung angemessen reagieren können. Zudem bieten wir eine Reihe nützlicher Accessoires und Zubehör an, die Ihren Fitform-Sessel noch komfortabler machen.



Visko-elastischer Schaum



Intelli-Gel® Sitzfläche

## Exakt auf Maß

Neben den Standard Einstellmaßen der Sessel der Fitform Pflege-Kollektion sind noch zahlreiche weitere Maße möglich.

Die Sitztiefe ist standardmäßig in 6 Stufen einstellbar: 43 – 45 – 47 – 49 – 51 – 53 cm. Zudem sind auch kleinere und noch größere Sitztiefen möglich.

Die Sitzhöhe kann zwischen 40 und 60 cm eingestellt werden. Um Sitzhöhen von 36 cm, 37 cm, 38 cm und 39 cm zu erzielen, wird ein verändertes Sitzkissen verbaut.

Die Höhe der Armlehnen kann zwischen 16 bis 29 cm eingestellt werden. Für kleinere und höhere Armlehnenhöhen erfolgt ein spezieller Sonderbau.

Die Sessel der Fitform Pflege-Kollektion sind in verschiedenen Sitzbreiten (abhängig vom Modell) von 45 cm bis 75 cm erhältlich. Die größeren Sitzbreiten sind für ein Körpergewicht von bis zu 225 kg geeignet und werden serienmäßig mit einer sogenannten "Heavy Duty Beinstütze" geliefert. Die Rückenlehne kann zudem niedriger oder höher ausgeführt werden.

Siehe auch die Fitform Sitzlösungen auf Seite 8.

## Spezielle Anpassungen

### Andere Materialien für die Sitzflächen

Die Standard-Sitzfläche eines Fitform-Sessels wird aus Formschaum gefertigt. Diese Schaumqualität ist sehr belastbar, formbeständig und haltbar und fühlt sich zudem komfortabel und fest an. Selbstverständlich kann auch aus anderen Materialien gewählt werden. Wie zum Beispiel eine weichere Sitzfläche aus Latex oder eine Antidekubitus-Sitzfläche aus visko-elastischem Schaum die sich Ihrem Körper anpasst. Menschen die sehr viel sitzen und einem hohen Dekubitus-Risiko unterliegen empfehlen wir Intelli-Gel. Eine Gel-Sitzfläche mit Wabenstruktur die für eine optimale Druckverteilung sorgt. Zudem kann ein Fitform-Sessel der Pflege-Kollektion mit einer gepolsterten Sitzplatte geliefert werden, auf der spezielle Sitzkissen sowie Sitzschalen angebracht werden können.



Extra breiter Fitform 570 Vario Sessel

## Materialien für die Rückenlehne

Die Rückenlehnen der Fitform-Sessel der Pflege-Kollektion werden standardmäßig mit Formschaum ausgeführt. Diese Schaumqualität ist sehr belastbar, formbeständig und haltbar und fühlt sich zudem fest aber komfortabel an. Zudem kann aus anderen, weicheren Materialien wie zum Beispiel Latex oder visko-elastischem Schaum gewählt werden.

## Materialien auf Armlehnen und/oder Beinstützen

Für Menschen die sehr schmerzempfindlich unter den Armen oder Beinen sind, kann auf weichere und/oder druckentlastende Materialien ausgewichen werden.

## Besondere Bezüge

Für die Sessel der Fitform Pflege-Kollektion stehen zahlreiche unterschiedliche Bezugsstoffe zur Verfügung. Abhängig von den individuellen Anforderungen kann aus speziellen Bezügen gewählt werden. Beispielsweise wird mit Stamskin oder Silvertex ein wasserfester Bezug speziell für den Inkontinenz-Einsatz angeboten. Er ist antibakteriell, pflegeleicht und besonders für Räume mit hohen Hygiene-Vorgaben geeignet. Ebenfalls bei Inkontinenz kann auch auf den Niroxx-Bezug zurückgegriffen werden. Dieser ist wasserabweisend, schimmelhemmend und antibakteriell beschichtet, vermittelt jedoch das wohliche Gefühl eines herkömmlichen Microfaser-Bezuges. Uniform Melange ist ein elastischer und damit nach beiden Richtungen dehnbarer Bezugsstoff, der besonders für individuelle Anpassungen im Sitz- und Rückenlehnenbereich geeignet ist. Sarkotex ist ein elastischer Kunststoffbezug, der sowohl dehnbar wie auch wasserdicht und luftdurchlässig ist. Alle diese Bezüge sind selbstverständlich schwer entflammbar und erfüllen die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben.

## Optionen und Zubehör

Durch unzählige Optionen und individuelle Anpassungen bieten die Sessel der Fitform Pflege-Kollektion Lösungen für viele Krankheitsbilder und Handicaps.

### Verbreiterte Armlehnen

Um die Körperstabilität und die Armunterstützung zu optimieren, können die gepolsterten Armlehnen sowohl nach Innen wie auch nach Außen verbreitert geliefert werden.

### Verlängerte Beinstütze

Die Beinstütze eines richtig angemessenen Fitform-Sessels ist lang genug um die Unterschenkel komplett zu unterstützen. Sie endet vor der Ferse. In bestimmten Fällen wird jedoch auch eine zusätzliche Unterstützung der Ferse/Füße gewünscht. Hierfür bieten wir die Option der zusätzlich verlängerten Beinstütze. Bei dem Ausfahren der Beinstütze fährt automatisch eine ca. 8 cm Verlängerung aus. Sie ist federnd gelagert, dass die Beine / Füße nicht überdehnt werden.





Kopf- und Nackenkissen



Drehscheibe



Fitform Vario Rollensystem



Rolltisch

### Smart-Bedienung

Smart-Bedienung kombiniert persönlichen Sitzkomfort mit einfacher Bedienung des Sessels. Es gibt vier vorprogrammierte "Benutzerprofile". Diese kümmern sich darum, dass die Sesselbewegungen sicher ausgeführt werden, je nachdem, was der Benutzer möchte und braucht. Die Profile unterscheiden sich in der Entspannungs-/ Ruhebewegung (weit oder weniger weit hinten) und in der Aufstehbewegung (etwas oder vollständig angehoben). Die spezielle Smart-Handbedienung ist aufgrund der begrenzten Anzahl von Tasten einfach zu bedienen. Dies ermöglicht auch einem Benutzer mit einer verringerten kognitiven Fähigkeit, den Sessel leicht zu bedienen. Für zusätzliche Sicherheit ist es möglich, den Sessel zu verriegeln.



### Drehscheibe

Mit Hilfe der Drehscheibe unterhalb des Sessels wird dieser zum Drehsessel und lässt sich um 2 x 180° drehen. Um sicher aufstehen und einsteigen zu können, wird die Drehscheibe in der Aufstehposition automatisch blockiert. **Nur bei Sitzbreite: 45 - 51 - 57 cm**

### Akku

Das herumliegende Kabel im Zimmer ist bei einem elektrisch verstellbaren Sessel mit diesem optional zu bestellenden Akku passé. Gebrauchtsabhängig ist der Sessel ca. 14 Tage lang mit einer Akkuladung nutzbar. Mit Hilfe des beiliegenden Ladekabels sollte der Akku regelmäßig geladen werden.


### Infrarot Handbedienung

Die Infrarot-Handbedienung ist schnurlos, modern gestaltet und erlaubt eine Bedienung auch aus einiger Entfernung. Es wird ein "Blick-Kontakt" zwischen Handbedienung und Empfänger am Sessel benötigt.



### Heizung

Ein besonderer Genuss in den kalten Wintermonaten: Heizung in Sitz und Rücken. Gesteuert wird die 3-stufige Heizung mit einem separaten Handschalter.

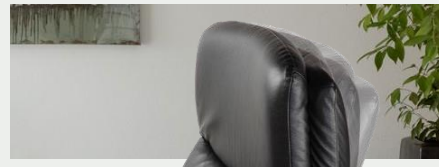

### Elektrisch verstellbare "Topswing-Kopfstütze"

Die Sessel unserer Pflege-Kollektion verfügen über eine serienmäßige "Topswing-Kopfstütze". Durch einen zusätzlichen Motor, kann diese Kopfstütze elektrisch in die gewünschte Position gebracht werden. (Nur in Kombination mit dem Topline-Paket!)

### Topline-Ausführung

Die Topline-Ausführung umfasst eine Heizung, eine elektrisch zu betätigende Schwenkkopfstütze, eine Memory-Funktion (2 Sitzpositionen vorprogrammieren) und eine elektrisch verstellbare Lordosenstütze. Eine manuell verstellbare Lordosenstütze ist bei allen Fitform Pflegesesseln standard.

### Rollensystem

Ein Rollensystem erleichtert das Bewegen des Sessels. Mit dem Fitform Vario Rollensystem kann der Sessel mit oder ohne Person auf einer ebenen Fläche bewegt werden.

### Inkontinenzmatte

Das ist eine flexible, waschbare Einlegematte die auf der Sitzfläche platziert wird, wenn das Risiko für Inkontinenz gegeben ist. Die Oberseite wird aus dem Bezug des Sessels gefertigt, die Unterseite besteht aus einem feuchtigkeitsundurchlässigen Material.

### Rolltisch

Wenn Sie gerne in Ihrem Sessel arbeiten, essen und lesen möchten, bietet Ihnen ein Rolltisch die passende Lösung hierfür. Der in Höhe und Breite verstellbare Rolltisch lässt sich auf Ihre Bedürfnisse und auf die Sessel-Maße einstellen und ist zudem leicht zu verrollen.

### Schwenkbare Arbeitsfläche

Eine schwenkbare Arbeitsfläche aus transparentem Kunststoff wird auf einem Metallträger an den Kufen des Sessels befestigt. Sie besticht durch eine moderne Optik. Diese Arbeitsfläche ist sinnvoll für Benutzer die im Sessel essen, lesen und andere Tätigkeiten ausüben möchten. Sie bleibt stets in der horizontalen Position und kann vom Sessel weggedreht werden. Eine Montage ist links wie rechts möglich.



### Tablett

Das speziell für die Fitform Sessel der Pflege-Kollektion entwickelte transparente Tablett, ermöglicht es optimal in dem Sessel zu essen, arbeiten oder zu lesen. Es wird einfach über die Armlehnen des Sessels geschoben. Da es nicht fest mit dem Sessel verbunden ist, besteht auch bei Nutzung der Kippfunktionen keine Beschädigungs-Gefahr. Mit Hilfe der optionalen Hängevorrichtung kann das Tablett vernünftig am Seitenteil des Sessels aufgehängt werden und ist stets griffbereit.



*Nicht alle Anpassungen, Optionen, Zubehör und Abmessungen sind miteinander kombinierbar. Ihr Fitform-Fachhändler vor Ort berät Sie kompetent und umfassend.*



### Kopf- und Nackenkissen

Für eine zusätzliche, optimale Unterstützung ihres Kopfes und Nackens bietet Fitform verschiedene Kopf- und Nackenkissen. Sie sind durch ein Gegengewicht höhenverstellbar und außerdem in unterschiedlichen Dicken, Abmessungen, Formen und mit unterschiedlichen Füllungen erhältlich.

# Fitform Sitzlösungen: wenn doch mehr benötigt wird

Leiden Sie unter Sitzproblemen, die durch eine Krankheit oder eine andere körperliche Einschränkung entstanden sind, dann kann ein gut angepasster Sessel sehr viel Linderung und Erleichterung verschaffen. Fitform hat dafür viele verschiedene spezielle Sitzlösungen entwickelt. Für diese Sitzlösungen können Sie sich vertrauensvoll an ein Fitform Kompetenz-Zentrum Sitzlösungen (FKZS) wenden.



Schalenform-Rückenlehne

Hemiplegie-Armlehnen

Abklappbares Seitenteil

## Fitform Kompetenz-Zentren Sitzlösungen

Für die Beratung und das Anmessen eines ergonomischen und komfortablen Fitform-Sessels, sind alle unsere Fitform-Händler perfekt ausgebildet. Wir haben jedoch auch Fitform-Händler, die dank ihres Wissens, ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer Ausbildung bei Fitform noch einen Schritt weiter gehen können. Diese Fitform-Händler sind sehr erfahren und haben sich zu einem echten Fitform Kompetenz-Zentrum Sitzlösungen (FKZS) entwickelt.



Arthrodesis-Sitz



## Was bietet Ihnen ein Fitform Kompetenz-Zentrum Sitzlösungen?

Unsere Fitform Kompetenz-Zentren Sitzlösungen sind darauf spezialisiert, kompetente Beratung und Lösungen für komplexere Situationen anzubieten. Ihre Stärke ist:

- Umfassende Erfahrung mit (Sitz-)Problemen im Zusammenhang mit bestimmten Störungen und Umständen.
- Umfassendes Wissen über den Einsatz eines individuell angepassten Fitform-Sessels, um bestimmte Probleme optimal auszugleichen.
- Umfassendes Know-how zu den verschiedenen Sonderlösungen von Fitform.

Nur bei einem Fitform Kompetenz-Zentrum Sitzlösungen werden die Sonderlösungen von Fitform angeboten und können dort auch getestet werden!

### Arthrodesis-Sitz

Die Arthrodesis-Sitzfläche wird speziell für Personen mit einer Beinamputation (Prothese) oder einer Hüft-/ Knieversteifung empfohlen. Diese geteilte Sitzfläche kann links, rechts oder an beiden Seiten einstellbar ausgeführt werden. Bei ausgefahrener Fußstütze kann die jeweilige Höhe an der Unterseite der Sitzfläche eingestellt werden (Bereich ca. 8 cm). In Kombination mit der verstellbaren Rückenlehne lässt sich so bequem der passende Sitzwinkel bereitstellen. Bei dem Ausfahren der Fußstütze kommt die Sitzfläche für eine gute Beinunterstützung automatisch nach oben. Mit Hilfe der Rückenverstellung kann jederzeit der gewünschte Sitzwinkel eingestellt werden. Für jede Sitztiefe wird eine spezielle Sitzfläche angefertigt. Der feste (nicht einstellbare) Bereich hat hierbei immer eine Tiefe von 12 cm. Die Beinstütze wird bei dieser Option mit einem Zwischenteil ausgeführt.

### Kyphose-Rückenlehne einstellbar


Das Mittelteil der Rückenlehne (Position der Wirbelsäule) wird mit weicheren Schäumen ausgeführt. Personen mit Kyphose (Wirbelsäulen-Verkrümmung) können so deutlich komfortabler sitzen. Die Wirbelsäule kann tiefer einsinken. Zusätzlich verfügt diese Rückenlehne neben der Top-Swing-Kopfstütze über einen zweiten Knickpunkt. So kann die Rückenlehne optimal an den Rücken angepasst werden.

### Schalenform-Rückenlehne

Diese Rückenlehne wird (ähnlich einem sportlichen Autositz) schalenförmig ausgeführt, um einen stärkeren Seitenhalt zu erzielen. So wird eine bessere Körperstabilität hergestellt und ein seitliches Herausrutschen minimiert.

### Hemiplegie-Armlehnen

Diese Armlehnen wurden speziell für Personen mit halbseitiger Lähmung entwickelt. Ein häufiges Problem bei Personen mit einer Hemiplegie sind Schmerzen in der Schulter, Unterarm oder Hand. Durch den individuellen Aufbau einer Hemiplegie-Armlehne, entsteht eine optimale Unterstützung und eine Linderung der Schmerzen. Die Armlehnenführung besteht aus einer Basis-Schale aus Kunststoff und verschiedener Unterstützungsformen. In Abhängigkeit von den individuellen Ansprüchen kann aus 3 verschiedenen Formen gewählt werden. Die Hemiplegie-Armlehne wird an dem Sitz des Sessels montiert, so dass diese einer Kippverstellung des Sessels folgt.

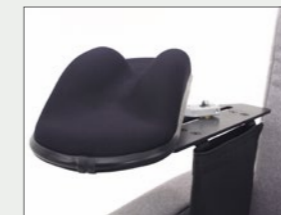

### Abklappbares Seitenteil

Dank eines abklappbaren Seitenteils ist für Rollstuhlfahrer ein leichter Transfer in den Sessel möglich. Diese Option wird manuell sowie elektrisch angeboten.

### Auswechselbare Sitzfläche

Ein ergonomischer Aufstehsessel mit auswechselbarem Sitzsystem ermöglicht es, den Standard-Schaumstoffsitz durch ein anderes Kissen zu ersetzen, zum Beispiel ein separates Anti-Dekubitus-Kissen. Eine Alternative zum Standardkissen kann auch ein Präventivkissen aus Memoryschaum, Latex oder einer Kombination davon sein. Ein solches Kissen soll speziell Druckgeschwüren vorbeugen.

### ILP Rückenlehne

Falls mehr seitliche Unterstützung benötigt wird (z.B. um Beschwerden vorzubeugen oder zu reduzieren) wurde die ILP Rückenlehne entwickelt. ILP steht für „Individual Lateral Pad Backrest“; so entsteht eine ganz individuell passende Seitenstütze. Dazu werden separat positionierbare Pelotten (Schaumpads) verwendet. Diese Stütze ist verstellbar und kann somit auf Wunsch nachträglich in ihrer Form verändert werden. Ein ergonomischer Aufstehsessel mit ILP-Rückenlehne sorgt dafür, dass der Rücken besser gestützt wird, die Wirbel in einer besseren Position bleiben und schiefes Sitzen reduziert wird.



ILP Rückenlehne & ILP-Extra Rückenlehne



Extra breiter Fitform 570 Vario Sessel

## Gesundes sitzen = bewegtes sitzen

Da Bewegung besser ist als Sitzen, kann Fitform zwei verschiedene Bewegungstechniken in Ihrem Sessel integrieren. Wir nennen sie RCPM und fitMotion. RCPM hilft im Kampf gegen Rückenschmerzen. fitMotion hingegen wurde für Menschen entwickelt, die lange stillsitzen und dadurch Dekubitus gefährdet sind.

### ILP Extra Rückenlehne

Menschen mit ernsthaften Problemen mit der Rumpfbalance brauchen mehr Unterstützung als eine „normale“ ILP-Rückenlehne bietet. Zum Beispiel bei einer schweren Deformierung des Rückens oder bei Gleichgewichtsproblemen in Kombination mit einem hohen Körpergewicht. Die ILP Extra Rückenlehne wurde speziell für Menschen entwickelt, die robusten Halt benötigen. Bei dieser Rückenlehne sind Schaumstoffpolster auf höhen- und breitenverstellbaren Seitenteilen aus Stahl montiert, damit sich die exakt benötigte individuelle Seiten-Unterstützung einstellen lässt. Dies sorgt für einen sehr stabilen und angenehmen Sitzkomfort.

### Extra breite Sitze

Für Menschen mit hohem Körpergewicht ist bequemes Sitzen nicht selbstverständlich. Da ein „normaler“ Sessel fast immer zu schmal ist, wird meist ein Sofa verwendet. Langes Sitzen oder Liegen auf einer Couch ohne die richtige Unterstützung kann zu vielen körperlichen Problemen führen. Ein ergonomischer Aufstehsessel mit einer breiteren Sitzfläche sorgt für besseren Komfort. Die größeren Sitzbreiten sind für ein Körpergewicht von bis zu 225 kg geeignet und werden serienmäßig mit einer sog. 'Heavy Duty Beinstütze' geliefert. Hiermit werden zudem ihre Beine optimal unterstützt.

### Heavy Duty Beinstütze

Eine Standard-Beinstütze ist für viele Menschen ausreichend, aber manchmal braucht es mehr. Auch bei einem insgesamt hohen Körpergewicht ist eine Standard-Beinstütze meist nicht geeignet. Die Heavy Duty Beinstütze wurde speziell für Menschen entwickelt, die zusätzliche Unterstützung für ihre Unterschenkel benötigen. Dies fördert

den „Rückfluss“ von Flüssigkeit, so dass die Beine weniger dick werden. Dies trägt zum Komfort bei und erleichtert das Gehen. Bei Menschen mit hohem Körpergewicht sorgt die Heavy Duty Beinstütze zudem für einen guten Halt der Beine, was zur allgemeinen Entspannung beiträgt. Diese speziell Beinstütze kann an jedem Fitform-Pflegesessel montiert werden.

**Ihr Plus:**

- + Kompetente Beratung durch umfassend geschulte Spezialisten
- + Umfangreiche Kenntnisse über zahlreiche Krankheitsbilder
- + Jahrelange Erfahrung mit Sitzlösungen
- + Mustersessel: Sitzlösungen erleben und ausprobieren
- + Hausbesuch: Beratung vor Ort mit Sessel möglich
- + Spezieller Anmeßsessel für optimale Abmessungen
- + 1A Service- und Garantieleistungen

**Fitform Kompetenz-Zentrum Sitzlösungen**

### RCPM


Der Sitz eines RCPM-Sessels macht kleine Drehbewegungen, während die Rückenlehne stillsteht. Sobald Sie auf dem Sessel sitzen, beginnen die Drehbewegungen. Obwohl Sie hier fast nichts fühlen werden, hat es eine grosse Wirkung. Die RCPM-Bewegung stimuliert den Stoffwechsel in den Bandscheiben, wodurch sie gestärkt werden. Die Bewegung der Wirbelsäule sorgt dafür, dass Rückenschmerzen reduziert oder sogar verhindert werden. Auch Schwellungen von Füßen und Unterschenkeln, die durch längeres Sitzen verursacht werden, nehmen mit RCPM ab. Dies bietet zusätzliche Entspannung. Dadurch steht der Benutzer mit mehr Energie aus dem Sessel auf.



### fitMotion

FitMotion besteht aus zwei Teilen: Pressure Relief und Slow Motion.

Pressure Relief kann aktiviert werden, wenn jemand mit den Füßen auf dem Boden im Sessel sitzt. Der Sessel neigt sich hierbei sehr langsam um 2x2 Grad nach hinten und dann um 2x2 Grad nach vorne. Dies wiederholt sich kontinuierlich. Slow Motion kann aktiviert werden, wenn jemand mit ausgefahrener Beinstütze im Sessel sitzt. Hierbei setzt eine sehr angenehme und beruhigende Schaukelbewegung ein. Nach jeweils 15 Minuten erhält der Benutzer ein Vibrationssignal, das angibt, dass es Zeit ist, sich zu bewegen. Wenn der Benutzer die Sitzposition nicht verstellt und/ oder den Sessel verlässt, wird die Bewegung automatisch fortgesetzt. Dies geschieht in der Slow Motion-Ausgangsposition, einer bequemen Entspannungsposition.

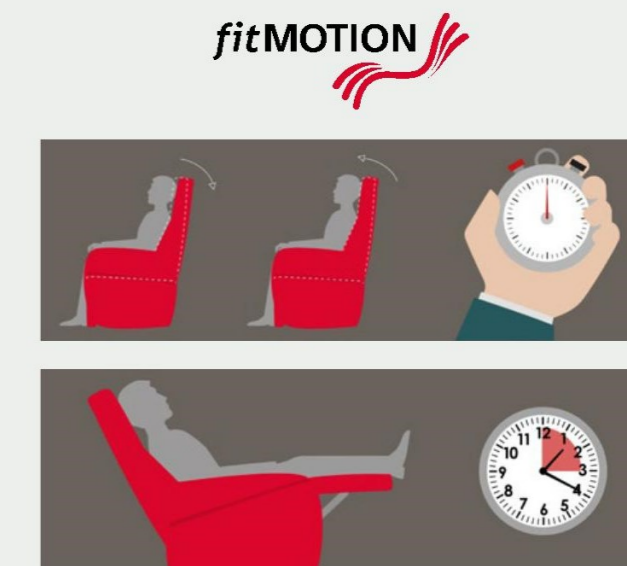

Ausführliche Informationen über diese Bewegungs-Module finden Sie in unserer Broschüre „Gesundes Sitzen“ sowie auf [www.narjes.de](http://www.narjes.de).

Persönliche Situation	Mögliche Problemlösung
Allergie	Bezug Stamskin
Balance-Probleme des körpers (teilweise)	Schalenrückenlehne / ILP und ILP Extra Rückenlehne
Rundrücken, Kyphose	Einstellbare Kyphose-Rückenlehne
Dekubitus unter Sitzfläche (EPUAP grad 2)	Intelli-Gel
Dekubitus Risiko unter Sitzfläche	Antidekubitus Sitzflächen (Visko) / Auswechselbare Sitzfläche
Dekubitus Risiko unterer Rücken/oberer Rücken	Rückenlehne mit einer Lage oder komplett Visko-Schaum oder Latex
Dekubitus Risiko Unterschenkel	Visko-Schaum auf der Beinstütze
Dekubitus Risiko Unterarme	Visko-Schaum auf den Armlehnen
Empfindliches Gewebe, sehr leichte Person	Weiche Sitzfläche für unterschiedliche Körpergewichte
Empfindliches Gewebe Unterarme	Eine Lage Latex auf den Armlehnen
Empfindliches Gewebe unterer Rücken	Rückenlehne mit einer Lage oder komplett Latex
Empfindliches Gewebe Unterschenkel	Eine Lage Latex auf der Beinstütze
Halbseitige Lähmung	Hermiplegie-Armlehne
Inkontinenz zeitweise / Anfangsstadium	Inkontinenzmatte / Bezug Niroxx / Sitzfläche und Rücken Bezug Stamskin
Inkontinenz durchgehend	Sessel-Bezug Stamskin
Inkontinenz + Dekubitus Risiko	Antidekubitus-Sitzfläche (Visko-Schaum oder Intelli-Gel) in Kombination mit Sarkotex-Bezug
Inkontinenz + Dekubitus (ausgeprägt)	Intelli-Gel-Sitzfläche mit Sarkotex-Bezug
Langes starres Sitzen, wenig Bewegung	fitMotion Bewegungs-System
Geistige Einschränkung, Probleme bei Bedienung	Smart-Bedienung (begrenzte Anzahl von Tasten)
Nacken-Probleme	Nackenkissen Nr. 5 mit weicher Füllung, elektrische Kopfstütze
Neigung der Arme von den Armlehnen zu gleiten	Breitere Armlehnen nach Innen oder Außen
Notwendigkeit Sessel (mit or ohne Person) zu verrollen	Mobility-Kit Rollensystem
Notwendigkeit Sessel (ohne Person) zu verrollen	Laufrollensystem selbstbremsend
Notwendigkeit tägliche Aktivitäten im Sessel zu verrichten	Diverse Tisch-/ Rolltisch-Lösungen
Notwendigkeit die Fersen zu unterstützen	Zusätzlich verlängerte Fußstütze
Probleme mit Knie und Hüfte	Arthrodese-Sitz in Kombination mit Verstellung der Rückenlehne
Rheumatische Beschwerden, frieren, geringes Gewicht	Heizung in Sitz und Rückenlehne
Risiko Kabel als Stolperfalle	Akku
Risiko das die Beine von der Beinstütze gleiten	Seiten-Pelotten an der Beinstütze
Spastiken	Bezug Stamskin aufgrund des intensiven Gebrauchs
Muskelerkrankungen	Aufstehbewegung Nr. 5, Lift, extra hohes Aufstehsystem
Rollstuhlfahrer mit guter Arm-/ Handfunktion	Wegklappbares Seitenteil mit manueller Bedienung
Rollstuhlfahrer mit eingeschränkter Arm-/ Handfunktion	Wegklappbares Seitenteil mit elektrischer Bedienung
Rückenschmerzen	Verstellbare Lendenstütze (evtl. elektrisch über Topline-paket), RCPM-Sitzsystem
Verkrampfte Muskeln	fitMotion Bewegungs-System
Persönliche Maße	Möglichkeiten außerhalb der Standard-Abmessungen
Dünne, schmale Person	Sitzbreite 45 cm
Dünne, kleine Person	Sitzhöhe 36-37-38-39 cm, Sitztiefe 37-39-41 cm,
Mini-Ausführung (Sitzbreite 45 cm und Rückenlehne 72 cm)	Sitzhöhe 36-37-38-39 cm, Sitztiefe 37-39-41 cm, Rückenlehnenhöhe 72 cm
Kleine Person	Sitzhöhe 36-37-38-39 cm, Sitztiefe 37-39-41 cm, Rückenlehnenhöhe 72 cm
Gewichtige Person	Sitzbreite 57 cm mit mechanischer Verstärkung oder breiteren Sitzen, die schwerere Personen serienmäßig für ein Körpergewicht bis 225 kg ausstatten, einschließlich einer sogenannten "Hochleistungs-Beinstütze".
Lange Person	Rückenlehne 94 oder 104 cm, Sitztiefe 55-57-59 cm



Abb. Modell 574 Vario

## Gütesiegel und Anerkennungen

Der Verein Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), Bremervörde in Deutschland sieht es als Hauptzweck, Rückenschmerzen vorzubeugen. Eine der wichtigsten Aufgaben besteht darin, Menschen in verschiedenen Lebensphasen über die richtigen Produkte zu beraten, so dass Rückenschmerzen rund um die Uhr vermieden werden können. Weil häufig nicht genügend Know-how angesichts ergonomischer Aspekte verfügbar ist, um die richtige Produktwahl zu treffen, hat AGR ein Prüfzeichen ins Leben

gerufen: das AGR-Gütesiegel. Dieses kann nur nach umfassenden Prüfungen durch unabhängige Sachverständige erworben werden. Bereits im Jahr 2000 hat Fitform die AGR-Zertifizierung erhalten.



Fitform-Sessel sind zudem offiziell durch den niederländischen Verein für Rückenschmerz-Patienten N.V.V.R. "Die Wirbelsäule" anerkannt.



Aus dieser Broschüre können keinerlei Rechte abgeleitet werden. Mögliche Änderungen in den Kollektionen, Produkten und Texten vorbehalten.



### Ihr Fitform-Händler

#### **Möbelhandel Narjes**

Aufstehsessel - Pflegesessel - Rehasessel  
Kaisersbusch 1  
D-42781 Haan / Rheinland

Tel.: 02129 1287  
Mobil: 0177 7287656  
E-Mail: [info@narjes.de](mailto:info@narjes.de)

Erfahren Sie gleich mehr unter:  
Internet: [www.narjes.de](http://www.narjes.de)

#### Unsere Geschäftszeiten:

Montags bis Freitags von 8:00 bis 19:00 Uhr  
Samstags von 8:00 bis 14:00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen ermöglichen wir Ihnen gern einen Besuch in unseren Ausstellungsräumen nach telefonischer Vereinbarung unter der Mobilnummer

**0177 728 76 56**